

Defibrillator HeartStart FRX

Die TSG Helberhausen hat einen Defibrillator „HeartStart FRX“ von Philips angeschafft! Dieser befindet sich zum Schutz in einer roten Aufbewahrungstasche in einem grünen Wandschrank, welcher in der Turnhalle gegenüber den Herren- und Damentoiletten an der Stelle des ehemaligen Telefonschranks platziert ist.



Der Defi dient dazu, bei Herzrhythmusstörungen Leben zu retten und kann ausdrücklich von allen, auch und gerade von Laien, bedient werden! Er ist für einen Notfall in der Halle und bei Veranstaltungen/Wettkämpfen außerhalb der Halle angeschafft worden und sollte auch nur dann aus der Tasche geholt und geöffnet werden.





So sieht der Inhalt der Aufbewahrungstasche aus. Auf der rechten Seite befindet sich der eigentliche Defibrillator mit dem Einschaltknopf (1) in Grün und der Schocktaste (3) in Rot. Links daneben sind ein paar Elektroden für Erwachsene und Kinder in einem. Bei Kindern muss zusätzlich der Kinderschlüssel, sichtbar ganz links, in den dafür vorgesehenen Schlitz oben zentral im Defibrillator gesteckt werden, damit dieser den Strom runter regelt.

Benutzung des Defis:

1. Defi aus dem Schrank holen und Tasche öffnen
2. **Grüne** Taste drücken und warten bis Stimme ertönt
3. Den Anweisungen der Stimme folgen
 - a. Oberkörper des Patienten frei machen
 - b. Pads richtig aufkleben
 - c. **Schocktaste** drücken, sobald Anweisung erfolgt und vom Patienten Abstand halten

Darauf achten, dass bei Kindern unter 8 Jahren oder unter 25 kg der Kinderschlüssel zu verwenden ist!

